

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Blephaclean®

Ten produkt jest wyrobem medycznym.

Przed zastosowaniem zapoznaj się z instrukcją stosowania.

Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

WSKAZANIA

BLEPHACLEAN przeznaczony jest do codziennej higieny powiek.

Produkt do stosowania wyłącznie na skórę. Unikać bezpośredniego kontaktu z powierzchnią oka.

ODPOWIEDNI DLA

- Dorosłych,
- Dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy – u dzieci produkt powinien być podawany przez rodziców lub opiekunów.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie należy stosować produktu BLEPHACLEAN w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników (patrz opis wyrobu).

Z powodu braku wystarczających danych nie należy stosować produktu BLEPHACLEAN u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią, chyba że zaleci to lekarz.

OPIS WYROBU

BLEPHACLEAN to sterylne chusteczki nasączone płynem, przeznaczone do codziennej higieny powiek.

Płyn zawiera: glicynę kapryloilową, hialuronian sodu, PEG 8, poloxamer 184, polisorbitat 20, glikol propylenowy, wyciąg z hydrokotyli (glikol propylenowy, wyciąg z wąkrotki azjatyckiej *Centella asiatica* i woda), kompleks regulujący sebum, niezawierający konserwantów (glikol propylenowy, wyciąg z korzenia kosańca florenckiego *Iris florentina*, siarczan cynku, alkohol i woda), PEG 6 caprylic/capric glycerides (kaprylano-kaprynian makrogolo-6-glicerolu), fosforan dipotasowy, wodorotlenek sodu, diwodorofosforan potasu, wodę oczyszczoną.

Ze względu na zawartość naturalnych wyciągów roślinnych kolor chusteczek może się różnić, co jest zjawiskiem normalnym.

KORZYŚCI, WYDAJNOŚĆ I MECHANIZM DZIAŁANIA

BLEPHACLEAN to sterylne chusteczki do codziennej higieny powiek, zwłaszcza w przypadku:

- wrażliwej skóry okolic oczu i powiek;
- konieczności usunięcia z powiek zanieczyszczeń, pyłków i wydzieliny, co może być częścią pielęgnacji podczas występowania alergii lub infekcji oczu;
- istniejącego stanu zapalnego lub zakażenia powiek, takiego jak zapalenie brzegów powiek, zaburzenia czynności gruczołów Meiboma (MGD), jęczmień lub gradówka. Dolegliwości te mogą powodować objawy zespołu suchego oka, takie jak swędzenie, poczucie piasku w oczach, ból i (lub) zaczerwienienie oczu;
- w przypadku konieczności oczyszczenia powiek przed zabiegami okulistycznymi, takimi jak zastrzyki lecznicze do oka (iniekcje do ciała szklistego), laserowe korekcje wad wzroku (LASIK lub PRK) i operacja usunięcia zaćmy. Ponieważ BLEPHACLEAN jest dobrze tolerowany, można go również stosować po operacji, zgodnie z zaleceniami lekarza

lub lekarza okulisty.

BLEPHACLEAN oczyszcza i usuwa kurz, pyłki oraz wydzielinę z powiek. BLEPHACLEAN nie narusza naturalnej flory bakteryjnej skóry wokół oczu.

Produkt testowany pod kontrolą okulistyczną.

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Stosowanie:

Przed zabiegiem lub operacją oka produkt należy stosować **dwa razy dziennie** przez 5 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W pozostałych przypadkach należy stosować **dwa razy dziennie**, rano i wieczorem, przez 3 tygodnie, a następnie raz dziennie przez 3 miesiące lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Niektóre stany zapalne powiek są przewlekłe i wtedy higienę powiek i ich brzegów należy stosować systematycznie i długoterminowo.

Stosowanie produktu BLEPHACLEAN nie wymaga specjalnego szkolenia.

W przypadku noszenia soczewek kontaktowych należy je zdjąć przed zastosowaniem produktu BLEPHACLEAN.

Przed użyciem chusteczek należy dokładnie umyć ręce.

Rozerwać saszetkę, aby ją otworzyć (Rysunek 1) i rozłożyć znajdującą się w środku chusteczkę. Nie używać żadnych narzędzi do otwierania saszetki.



Rysunek 1: Otwieranie saszetki

Owinąć chusteczkę wokół palca wskazującego.


Trzymając oko zamknięte, delikatnie przyłożyć chusteczkę do powiek i nasady rzęs (Rysunek 2).

Delikatnie masować powieki małymi, kolistymi ruchami, usuwając wszelkie zanieczyszczenia, wydzielinę lub kosmetyki.



Rysunek 2: Oczyszczanie powiek i rzęs

Przed lustrem delikatnie pociągnąć dolną powiekę drugą ręką w dół, a następnie przetrzeć brzeg powieki chusteczką owiniętą wokół palca (Rysunek 3).

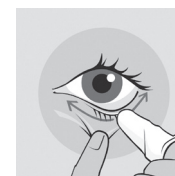

Rysunek 3: Oczyszczanie brzegów powiek

Czynność powtórzyć wokół drugiego oka, używając nowej chusteczki.

Po użyciu chusteczek BLEPHACELAN nie ma konieczności splukiwania produktu.

UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przed pierwszym użyciem produktu należy sprawdzić, czy opakowanie jest nienaruszone: nie stosować chusteczki, jeśli saszetka jest otwarta lub uszkodzona.

Użytej chusteczki nie należy stosować ponownie, ponieważ może nie działać właściwie i może to zwiększać ryzyko zakażenia.

Jeśli objawy nasiliły się lub nie ulegną poprawie, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

OSTRZEŻENIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Unikać bezpośredniego kontaktu produktu BLEPHACLEAN z powierzchnią oka, ponieważ może to wywołać odczucie pieczenia. W przypadku kontaktu z powierzchnią oka splukać sterylną wodą lub roztworem soli fizjologicznej.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podczas stosowania BLEPHACLEAN zgłaszano następujące zdarzenia: pieczenie lub uczucie swędzenia przez kilka minut po użyciu, zaczerwienienie lub obrzęk powiek, zaczerwienienie oczu, reakcje alergiczne.

W takich przypadkach osoby noszące soczewki kontaktowe nie powinny ponownie ich zakładać.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek działań niepożądanych lub nietypowych odczuć po użyciu tego produktu, należy skontaktować się z personelem medycznym i zgłosić te informacje lokalnemu dystrybutorowi, producentowi lub lokalnemu urzędowi do spraw zdrowia (patrz kontakty na końcu instrukcji stosowania).

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I USUWANIA

Przechowywać w temperaturze od 8°C do 25°C.

Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgoci.

Chusteczkę należy wyrzucić natychmiast po użyciu.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na saszetce i opakowaniu zewnętrznym.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca, o ile opakowanie jest nienaruszone i było przechowywane prawidłowo.

Produkt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny i zgodnie z lokalnymi wytycznymi (saszetkę należy usunąć jako odpad komunalny, opakowanie zewnętrzne i ulotka nadają się do recyklingu).

Data wydania i wersja instrukcji stosowania: Ver.3 23/12/2021

Producent:



Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Francja
www.laboratoires-thea.com
Kontakt: odnośnik "Contact us"

PL

Dystrybutor: Thea Polska Sp. z o.o., ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa
Organ właściwy ds. wyrobów: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Departament Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 492 15 54,
fax:+48 22 492 11 09
e-mail: incydenty@urpl.gov.pl
<http://www.urpl.gov.pl/>

CE 0459

ZNACZENIE PIKTOGRAMÓW NA OPAKOWANIU

	Producent
	Numer serii
	Data produkcji
	Data przydatności do użycia
	Zakres temperatur przechowywania
	Wyrób jałowy (sterylny) - wysterylizowany radiacyjnie
	Wyrób medyczny
	Należy przeczytać instrukcję stosowania
	Do jednorazowego użytku – nie stosować ponownie
	Nie stosować, jeśli opakowanie (saszetka) jest uszkodzone
	Środki ostrożności

Théa

N1179LG2L29E/X0622 - XXXXXX